

Styletto

Bruksanvisning



Innehåll

Välkommen	4
Din hörapparat	5
Apparatmodell	5
Bekanta dig med din hörapparat	5
Komponenter och namn	6
Lyssningsprogram	8
Funktioner	8
Daglig användning	9
Laddning	9
Slå på och av	10
Växla till standby-läge	10
Sätta in och ta ut hörapparater	11
Justera volymen	15
Byta lyssningsprogram	15
Speciella hörsituationer	16
Prata i telefonen	16
Underhåll och skötsel	17
Hörapparater	17
Hörselgångsdelar	19
Professionellt underhåll	21

Viktig säkerhetsinformation	22
Säkerhetsinformation om laddningsbara litiumjonbatterier	22
Övrig information	24
Säkerhetsinformation	24
Tillbehör	24
Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden	24
Kasseringsinformation	26
Symboler som används i den här dokumentationen	26
Felsökning	26
Service och garanti	28

Välkommen

Tack för att du valt att använda våra hörapparater. Det kan ta lite tid att lära känna dem, precis som med allt som är nytt.

Den här guiden, tillsammans med stöd från din audionom, hjälper dig att förstå fördelarna och den bättre livskvalitet som dina hörapparater erbjuder.

För att få ut mesta möjliga av dina hörapparater rekommenderas att du bär dem varje dag, hela dagen. Det innebär att du vänjer dig vid dem.



VARNING

Det är viktigt att läsa hela den här användarguiden och säkerhetsmanualen noga. Följ säkerhetsinformationen för att undvika skada.



Ladda hörapparaterna till fullo innan du använder dem för första gången. Följ instruktionerna i laddarens bruksanvisning.

Din hörapparat



Den här användarguiden beskriver vilka egenskaper man kan ha som tillval i sina hörapparater.

Be din audionom berätta om vilka egenskaper som gäller för dina hörapparater.

Apparatmodell

Din hörapparat är en RIC (Receiver-in-Canal) modell. Hörtelfonen är placerad i hörselgången och ansluten till apparaten via en hörtelefonledning. Instrumenten är inte avsedda för barn under 3 år eller personer med en utvecklingsålder på under 3 år.

En battericell (laddningsbart litiumjonbatteri) är permanent inbyggd i hörapparaten. Detta möjliggör enkel laddning med vår laddare.

Den trådlösa funktionen möjliggör avancerade audiologiska funktioner och synkronisering mellan dina två hörapparater.

Bekanta dig med din hörapparat

Din hörapparat har inga kontroller.

Om du vill justera volymen eller växla lyssningsprogram manuellt, be din audionom om en fjärrkontroll.

Komponenter och namn



① Hörselgångsdel

② Hörtelefon

③ Hörtelefonledning

④ Mikrofonöppningar

⑤ Laddningskontakter

⑥ Sidindikator
(R = höger öra,
L = vänster öra)

Du kan använda följande hörselgångsdelar i standardutförande:

Hörselgångsdelar i standardutförande	Storlek
☐  Click Sleeve (öppen eller sluten)	
☐  Click Dome™ (öppen eller sluten)	
☐  Click Dome halvöppen	
☐  Click Dome dubbel	

Du kan enkelt byta ut hörselgångsdelarna i standardutförande. Läs mer i avsnittet "Underhåll och skötsel".

Lyssningsprogram

1

2

3

4

5

6

Läs mer i avsnitt "Byta lyssningsprogram".

Funktioner



Tinnitusterapifunktionen genererar ett ljud som distraherar dig från din tinnitus.

Daglig användning

Laddning

Placera dina hörapparater i laddaren.

- Följ instruktionerna i laddarens bruksanvisning. Du finner även användbara tips gällande laddning i laddarens bruksanvisning.



Indikering av svag battericell

Du hör en varningssignal när battericellen börjar bli svag. Signalen upprepas var 15:e minut. Beroende på hur du använder hörapparaterna har du ungefär 1,5 timme på dig att ladda dem innan de slutar fungera.

Batteriets livslängd

Battericellen har som alla laddningsbara batterier en begränsad livslängd. Om de fulladdade hörapparaterna inte räcker till en hel dags användning (16 timmar normal användning utan ljudstreaming) rekommenderar vi att du återlämnar hörapparaterna till din audionom. Audionomen kan då byta ut dem.

Slå på och av

Du har följande möjligheter att slå på eller av dina hörapparater.

- ▶ Slå på: Ta ut apparaterna ur laddaren.

Uppstartsmelodin spelas i hörapparaterna. Volymen och lyssningsprogrammet **standard** har valts.

- ▶ Stänga av: Placera hörapparaterna i laddaren.

Observera att laddaren måste vara påslagen. Läs laddarens bruksanvisning för mer information.

Växla till standby-läge

Med hjälp av en fjärrkontroll eller en mobilapp kan du växla hörapparaterna till viloläge. Detta stänger av ljudet i hörapparaterna. När du lämnar viloläget väljs den volym och det lyssningsprogram som använts **tidigare**.

Obs!

- I viloläget är hörapparaterna **inte** helt avstängda. De drar en viss mängd ström.
Därför rekommenderar vi att du använder viloläget endast under korta perioder.
- Om du vill lämna viloläget, men du inte har tillgång till fjärrkontrollen eller appen: Stäng av hörapparaterna och slå på dem igen genom (att placera dem i laddaren en kort stund tills en eller flera lysdioder tänds). Vänta

tills uppstartsmelodin spelas i hörapparaterna. Detta kan ta flera sekunder. Observera att volym och lyssningsprogram **standard** har valts.

Sätta in och ta ut hörapparater

Dina hörapparater har programmerats för höger och vänster öra. Bokstäver anger sidan:


- R = höger öra
- L = vänster öra

Sätta in en hörapparat:

- För Click Sleeves, se till att böjen på Click Sleeve är i linje med böjen på hörtelefonledningen.



Rätt:

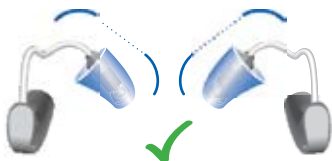


Fel:



- ▶ Håll hörtelefonledningen i böjen närmare hörselgångsdelen.
- ▶ Tryck försiktigt in hörselgångsdelen i hörselgången ①.
- ▶ Vrid den en aning tills den sitter bra.

Öppna och stäng munnen för att undvika luftansamling i hörselgången.

- ▶ Lyft hörapparaten och skjut den över örats ovansida ②.

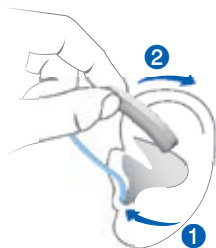



VARNING

Risk för skada!

- Sätt försiktigt i hörselgångsdelen och inte för djupt in i örat.

i

- Det kan vara bra att sätta in **höger** hörapparat med **höger** hand och **vänster** hörapparat med **vänster** hand.
- Om du har problem med att föra in hörselgångsdelen kan du använda den andra handen för att försiktigt dra öronsnibben nedåt. Detta vidgar hörselgången och underlättar införandet av hörselgångsdelen.


Stödvingen, som erbjuds som tillval, hjälper till att hålla kvar hörselgångsdelen i örat. Gör så här för att placera stödvingen:

- Böj stödvingen och placera den försiktigt längst in i öronmusslan i ditt öra (se bilden).



Ta bort en hörapparat:

- Lyft hörapparaten och skjut den över örats ovansida ❶.

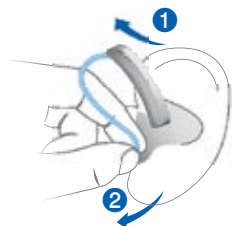

- Ta tag i hörtelefonen i hörselgången med två fingrar och dra försiktigt ut den ❷.

Dra inte i hörtelefonledningen.



VARNING

Risk för skada!

- I mycket sällsynta fall kan det hända att hörselgångsdelen blir kvar i örat när du tar avlägsnar hörapparaten. Om detta händer bör du låta sjukvårdspersonal ta ut hörselgångsdelen.

Rengör och torka dina hörapparater efter användning.
Läs mer i avsnittet "Underhåll och skötsel".

Justera volymen

Din hörapparat justerar automatiskt volymen efter varje ljudmiljö.

- Om du föredrar att ställa in volymen manuellt kan du använda en fjärrkontroll.

En valfri signal kan indikera volymändringen.

Byta lyssningsprogram

Dina hörapparater justerar sitt ljud automatiskt, beroende på ljudmiljön.

Dina hörapparater kan också ha flera lyssningsprogram där du kan ändra ljudet om det behövs. En valfri signal kan indikera programbytet.

- Använd ett fjärrkontrollsalternativ för att ändra lyssningsprogrammet manuellt.

Se avsnittet "Lyssningsprogram" för en lista med dina lyssningsprogram.

Standardvolymen används.

Speciella hörsituationer

Prata i telefonen

När du pratar i telefonen ska du hålla telefonluren en aning ovanför örat. Hörapparaten och telefonluren måste vara i nivå med varandra. Vrid telefonluren en aning så att inte örat täcks helt och hållet.



Telefonprogram

Det kan hända att du föredrar en viss volym när du använder telefonen. Be din audionom konfigurera ett telefonprogram.

- Växla till telefonprogrammet när du pratar i telefonen.

Om ett telefonprogram är konfigurerat för dina hörapparater finns detta med i avsnittet "Lyssningsprogram".

Underhåll och skötsel

För att undvika skada är det viktigt att du sköter dina hörapparater och följer några grundläggande regler, som snart blir en del av din dagliga rutin.

Hörapparater

Rengöring

Dina hörapparater har en skyddande beläggning. Om rengöring inte utförs regelbundet kan du dock skada hörapparaterna eller orsaka personskada.

- ▶ Rengör dina hörapparater dagligen med en mjuk, torr duk.
- ▶ Använd aldrig rinnande vatten och doppa aldrig enheterna i vatten.
- ▶ Använd aldrig tryck under rengöringen.
- ▶ Fråga din audionom om rekommenderade rengöringsprodukter, särskilda set med produkter för skötseln och be om mer information om hur du håller dina hörapparater i gott skick.



Torkning

Använd konventionella produkter för att torka hörapparaterna. Fråga din audionom om rekommenderade torkprodukter och enskilda instruktioner gällande torkning av hörapparaterna.

Förvaring

- Kortvarig förvaring (upp till flera dagar): Stäng av hörapparaterna genom att placera dem i laddaren.

Laddaren måste vara påslagen. Om laddaren inte påslagen och du placerar hörapparaterna i laddaren stängs hörapparaterna **inte** av.

Observera att hörapparaterna **inte** stängs av helt när du stänger av dem via fjärrkontrollen eller mobilappen. De försätts bara i viloläge och drar fortfarande ström.

- Långvarig förvaring (veckor, månader eller längre): Ladda först hörapparaterna till fullt. Lämna dem i laddaren och stäng sedan av laddaren. Läs laddarens bruksanvisning för mer information.

Hörapparaterna stängs också av. Vi rekommenderar att använda torkningsprodukter vid förvaring av hörapparaterna.

Du måste ladda hörapparaterna var sjätte månad för att undvika att battericellen djupurladdas. Djupurladdade battericeller kan inte laddas mer och måste bytas ut. Vi rekommenderar att du laddar dem oftare än var sjätte månad.

Observera förvaringsförhållanden i avsnittet "Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden".

Hörselgångsdelar


Rengöring

Det kan samlas cerumen (öronvax) på hörselgångsdelarna. Det kan påverka ljudkvaliteten. Rengör hörselgångsdelarna dagligen.

För alla typer av hörselgångsdelar:


- Rengör hörselgångsdelen med en mjuk och torr duk direkt efter uttagningen.

Detta förhindrar att cerumen blir torrt och hårt.

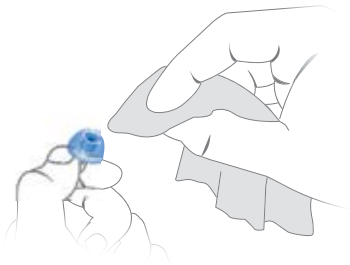

För Click Domes eller Click Sleeves:

- Kläm på spetsen av hörselgångsdelen.

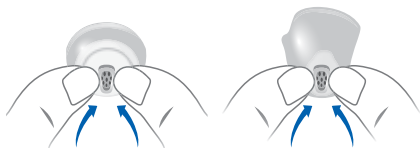


Byta ut

Byt ut hörselgångsdelarna i standardutförande cirka var tredje månad. Byt dem tidigare om du upptäcker sprickor eller andra förändringar. Tillvägagångssättet när hörselgångsdelar i standardutförande byts beror på vilken typ av hörselgångsdel det gäller. I avsnitt "Komponenter och namn" har din audionom markerat vilken typ av hörselgångsdel du har.

Byta ut Click Domes

- För att ta bort den gamla Click Dome använder du utdragningsverktyget eller följer instruktionerna på förpackningen till Click Domes. Var försiktig så att du inte drar i hörtelefonledningen.

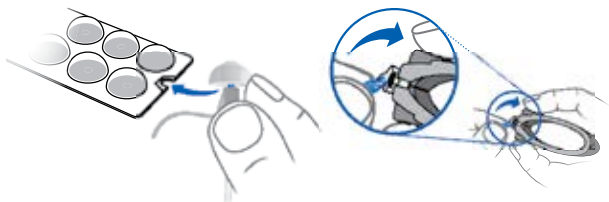

Utdragningsverktyget erbjuds som tillbehör.

- Var extra noga med att den nya Click Dome klickar fast tydligt.
- Kontrollera att den nya Click Dome passar ordentligt.



Byta ut Click Sleeves

- Vänd Click Sleeve ut och in.

- Ta tag i Click Sleeve och hörtelefonen (inte hörtelefonledningen) med fingrarna och dra av Click Sleeve.
- Var extra noga med att den nya Click Sleeve klickar fast tydligt.



Professionellt underhåll

Din audionom kan utföra noggrann professionell rengöring samt underhåll.

Fråga din audionom om vad som rekommenderas för dig när det gäller underhållsintervaller och support.

Viktig säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation om laddningsbara litiumjonbatterier



FARA

Ett laddningsbart litiumjonbatteri är permanent inbyggt i enheten. Felaktig användning av enheten kan leda till att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet sprängs.

Risk för skada, brand eller explosion!

- Följ säkerhetsinstruktionerna för det laddningsbara litiumjonbatteriet i det här avsnittet.

- Observera driftsförhållanden. Se avsnittet "Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden".
- Var särskilt noggrann med att skydda enheten från extrem värme (t.ex. brand, mikrovågsugnar, induktionsugnar eller andra höginduktiva fält) och solljus.
- Ladda hörapparaterna endast med den godkända laddaren. Be din audionom om hjälp.
- Montera inte isär enheten.
- Använd inte enheten i explosiva atmosfärer.
- Använd inte enheter som är missformade eller uppenbart skadade.

- Använd inte enheten när dess prestanda efter laddning försämras avsevärt. Returnera apparaten till din audionom.
- Kasta inte enheten i eld eller vatten.

Ersättnings- och reparationsarbeten måste utföras av en fackutbildad person. Därför:

- Reparera inte och byt inte ut det laddningsbara litiumjonbatteriet på egen hand.
- I det osannolika fallet att ett laddningsbart litiumjonbatteri spricker eller exploderar ska du hålla alla brännbara material på avstånd.

Om något av det ovanstående inträffar ska du lämna tillbaka enheten till audionomen.



FARA

Risk för elektriska stötar!

- Använd laddaren endast till en USB-strömförsörjning som uppfyller IEC 60950-1 och/eller IEC 62368-1.

Övrig information

Säkerhetsinformation

Mer säkerhetsinformation finns i säkerhetshandboken som medföljer enheten.

Tillbehör

Typen av apparat är avgörande för vilka tillbehör som finns. Exempelvis: en fjärrkontroll, en ljudstreamingsenhet eller en smartphoneapp för fjärrstyrning.

Vissa hörapparater stöder CROS och BiCROS lösningar för människor med ensidig dövhet.

Kontakta din audionom för mer information.

Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden

Driftsförhållanden	Urladdning	Laddning
Temperatur	0 till 50 °C (32 till 122 °F)	10 till 35 °C (50 till 95 °F)
Relativ luftfuktighet	5 till 93 %	5 till 93 %

Vid längre transport- eller förvaringsperioder ska följande förhållanden beaktas:

	Förvaring	Transport
Temperatur (rekommenderas)	10 till 25 °C (50 till 77 °F)	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Temperatur (maximalt intervall)	10 till 40 °C (50 till 104 °F)	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Relativ luftfuktighet (rekommenderas)	20 till 80 %	5 till 90 %
Relativ luftfuktighet (maximalt intervall)	10 till 80 %	5 till 90 %

Observera att du måste ladda hörapparaterna minst en gång var sjätte månad. Detaljerad information finns i avsnittet "Underhåll och skötsel".

För andra delar, till exempel laddaren, kan andra villkor gälla.



FARA

Risk för skada, brand eller explosion under frakt.

- Frakta battericeller eller hörapparater enligt lokala förordningar.



FARA

Risk för skada, brand eller explosion under frakt.

- Frakta hörapparaterna och/eller laddaren enligt lokala bestämmelser.

Kasseringsinformation

- ▶ För att undvika miljöförorening ska battericeller eller hörapparater inte slängas i hushållssoporna.
- ▶ Återvinn eller kasta battericeller eller hörapparater enligt lokala förordningar.

Symboler som används i den här dokumentationen



Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, måttliga eller mindre personskador.



Indikerar möjlig produktskada.



Råd och tips om hur du hanterar din apparat bättre.

Felsökning

Problem och möjliga lösningar

Ljudet är svagt.

- Höj volymen.
 - Ladda hörapparaten.
 - Rengör eller byt ut hörselgångsdelen.
-

Hörapparat avger visslande ljud.

- Sätt in hörselgångsdelen på nytt tills den sitter ordentligt.
 - Sänk volymen.
 - Rengör eller byt ut hörselgångsdelen.
-

Problem och möjliga lösningar

Ljudet är förvrängt.

- Sänk volymen.
 - Ladda hörapparaten.
 - Rengör eller byt ut hörselgångsdelen.
-

Hörapparat avger signaler.

- Ladda hörapparaten.
-

Hörapparat fungerar inte.

- Starta hörapparaten.
 - Ladda hörapparaten. Observera också statuslamporna på laddaren.
-

Kontakta din audionom om du stöter på fler problem.

Service och garanti

Serienummer

Vänster:

Höger:

Servicedatum

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garanti

Inköpsdatum:

Garantiperiod i månader:

Din audionom

**Tillverkare**

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0

Din kontakt i Sverige

Sivantos A/S
Box 1183
164 26 Kista

Besöksadress

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Telefon 08 400 22 390

D00184708/1/200/0918 | D00184708
03639-99T01-5300 SV-DNK | D00181733
Master Rev01, 06.2018
© 09.2018, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.se