



Life sounds brilliant.

Signia App-guiden

hittar du på vår hemsida: signia-hearing.se/apps eller genom att scanna QR-koden nedan.

* Scanna QR-kod genom att öppna din mobilkamera och hålla kameran över QR-koden

touchControl App

Kompatibel med:
binax, primax, Nx



touchControl
App

myControl App**

Kompatibel med:
**Styletto Connect samt övriga Nx-
hörapparater (bortsett från Pure 10,
Insio CIC/IIC samt Silk)**



myControl
App Android



myControl
App iPhone

easyTek App

Kompatibel med:
**primax-apparater med tillhörande
easyTek**



easyTek App

** För myControl App till Android krävs version 6.0 eller senare, för iPhone krävs iPhone 4s eller senare.. Enklare telefoner kan inte använda denna App. touchControl är då ett alternativ. För mer info om kompatibla modeller, se vår hemsida: signia-hearing.se/mycontrol

Parkoppling av Nx

När du parkopplat din iPhone med dina hörapparater kan du streama musik och samtal trådlöst. För streaming från Android-telefoner behövs tillbehöret StreamLine Mic.

myControl app är fjärrkontrollen som styr dina Nx hörapparater. Appen är kompatibel med iPhone samt vissa modeller av Android-telefoner.

För mer info se signia-pro.se/mycontrol

Parkoppla Nx med myControl app

Apple iOS

- Inställningar ► Allmänt ► Hjälpmedel ► MFi-hörapparater
- Aktivera Bluetooth
- Sätt hörapparaterna i parningsläge genom att starta om dem
- Placera hörapparaterna intill telefonen
- Välj hörapparaterna i listan och tryck på parkoppla

Android

- Gå till inställningar och aktivera Bluetooth
- Sätt hörapparaterna i parningsläge genom att starta om dem
- Välj hörapparaterna under "tillgängliga enheter"

Felsökning

Om du har problem att parkoppla hörapparaterna med din smartphone;

iPhone:

- Glöm enheten i telefonen under inställningar/allmänt/hjälpmedel/MFi-hörapparater
- Ta bort myControl app
- Starta om telefonen
- Installera myControl app på nytt
- Starta om hörapparaterna och utför parkopplingen på nytt

Android:

- Gå till inställningar/Bluetooth och glöm/ta bort hörapparaterna
- Ta bort myControl app
- Starta om telefonen
- Installera myControl app på nytt
- Starta om hörapparaterna och utför parkopplingen på nytt

Om du fortfarande upplever problem att parkoppla hörapparaterna mot din smartphone eller mot myControl app kan följande steg möjligen hjälpa dig;

- Byt batteri
- Aktivera och inaktivera flygplansläget i appen
- Kontrollera att din smartphone är kompatibel med myControl app
- Kontakta din audionom som kan utföra en uppdatering/återställning av firmware samt glömma alla tidigare Bluetooth-enheter i hörapparaterna (Connexx/service/radera alla parkopplade bluetoothenheter)

För mer ingående info kring funktioner i myControl app besök vår hemsida eller scanna QR-koden på sida 1.

Support: 08-400 22 390



touchControl
App



myControl
App



easyTek
App



Din kontakt i Sverige

Sivantos A/S
Box 1183
164 26 Kista

Besöksadress:

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Telefon 08 400 22 390

ce166/1/0219

© Signia GmbH 2019

www.signia-hearing.se